

檢驗項目(中英文)	Helicobacter pylori 幽門螺旋桿菌(碳-13)		健保代碼	30512	委外	否
檢體種類	氣體	檢體需求量	2 管	運送條件	室溫	
採檢容器	 <p>5 C.C.之玻璃試管附橡膠心之旋蓋</p>					
採檢注意事項	<p>1.採取收集檢體後：</p> <p>(1)收集到檢體的氣管不需冷凍或冷藏，置放於室溫下即可。</p> <p>(2)密封的檢體氣管置放於室溫下可保存 30 天。</p> <p>2.寄送檢體：</p> <p>(1)將二根氣體檢體，封裝好氣體氣管後寄出。</p> <p>(2)由於密封的檢體氣管置放於室溫下可保存 30 天以上。</p>					
採檢前準備	<p>1.需 NPO。</p> <p>2.以吹管緩慢呼氣於綠色氣管內，轉緊瓶蓋後貼上綠色標籤紙。 (如吹氣不足或疑似倒吸可以重吹數遍)。</p> <p>3.將試劑加飲用水至瓶上刻度處後搖勻，請病人喝下。</p> <p>4.30 分鐘後，再呼氣於另一黃色氣管內，貼上黃色標籤紙。 (此管非常重要，必要時請重做數次!!)</p>					
檢驗方法	Proto 2005 同位素比值質譜儀系統					
報告完成時間	14 天					
可送檢時間	周一至周五，下午 16:00 前					
生物參考區間	Positive Negative					
檢驗結果解釋	檢測是否感染胃幽門螺旋桿菌					
操作組別/分機	高醫胃鏡室 07/3121101*7753					